

V-Drive

Asistencia eléctrica
para su silla
manual



Información técnica V-Drive

							
Ancho de asiento	Velocidad máxima	Inclinación máxima	Radio de acción	Potencia	Baterías	Peso	Peso máximo usuario
39 - 53 cm 50 - 60 cm (Versión XXL)	6,4 km/h	8°	15 km 10 km	24 V - 150 W 24 V - 250 W (Versión XXL)	2 x 12 V 12 Ah 2 x 12 V 12 Ah (Versión XXL)	11,8 kg (s/ baterías) 8,2 kg (baterías)	135 kg 200 kg (Versión XXL)

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5cm y 1,5kg.)

Confort

El sistema V-Drive simplifica sus movimientos en las sillas manuales. El V-Drive libera al asistente de la silla de cualquier esfuerzo.

Funciona en pequeños escalones, inclinaciones, imperfecciones en el terreno o para simplemente pasar un día fuera de casa.

El mando es muy simple de usar, y asegura una óptima calidad y confort para el día a día en la combinación de su silla manual y el V-Drive.



Ofrecemos dos versiones del V-Drive, la primera estándar, para usuarios de menos de 135kg. y una versión para usuarios de hasta 200kg.

Instalación

El V-Drive es muy simple de instalar, y podrá poner el mando tanto a la izquierda como a la derecha de la silla. Podrá desmontar el V-Drive muy fácilmente para plegar la silla; desconecte el pack de baterías, el sistema de conducción y estará listo para plegar la silla.

Si no necesita utilizar su V-Drive en el camino, es suficiente con levantar el sistema de conducción y colgarlo de una de las empuñaduras. Así puede recuperar completamente el control de su silla de manera sencilla.

RehaGirona, s.l.

C/ Trens Petits, 1
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 Girona

Tel: 902 487272 • Fax: 972 405054

E-mail: rehagirona@rehagirona.com

Website: www.rehagirona.com

Para más información, contactar con su distribuidor habitual

